

## FILTRO ANTIALLERGICO PER PIATTAFORMA PHILIPS DREAMSTATION



Filtri monouso ultra fini per dispositivi CPAP e AUTOCPAP DreamStation di Philips Respironics.

I filtri sono una componente essenziale per la terapia CPAP, grazie alla loro capacità di rimuovere la polvere irritante, polline e particelle di fumo di tabacco dal flusso d'aria della CPAP.

I filtri ultra fini hanno lo scopo di aumentare il filtraggio che viene già operato dal filtro antipolline, bloccando anche il particolato più piccolo.

I filtri ultra fini non vanno mai utilizzati da soli, ma devono essere necessariamente combinati assieme ai filtri antipolline.

**Attenzione:** i filtri ultra fini sono fatti di carta, pertanto NON vanno lavati. Se si deposita un eccesso di polvere, è possibile scuoterli o soffiarla via, ma NON bisogna montare il filtro al contrario.

La durata massima di un filtro ultra fine è di 1 mese, dopodiché deve essere sostituito.