

DREAMWEAR FULL FACE MASK MASCHERA ORONASALE CON BRETELLA DI FISSAGGIO E WHISPER



La maschera oronasale DREAM WEAR FULL FACE MASK è progettata per fornire un'interfaccia per la somministrazione della terapia CPAP (Pressione positiva continua delle vie aeree) o bi-level ai pazienti.

La maschera deve essere utilizzata su pazienti (peso >30 kg) ai quali è stata prescritta la terapia CPAP o bi-level.

Nota:

- Poiché in questa maschera è incorporata una valvola espiratoria, non è necessario utilizzarne una separata.

Materiali Utilizzati:

Struttura: silicone

Cuscinetto: silicone e policarbonato

Raccordo a gomito: policarbonato

Bretella di fissaggio: tessuto Lycra

N.B. NON E' RILEVATA PRESENZA DI LATTICE DI GOMMA NATURALE O DEHP

Pulizia:

Giornalmente: lavare a mano le parti non in tessuto.

Settimanalmente: lavare a mano le parti in tessuto. Smontare la maschera.

Immergere la maschera in acqua calda con detersivo liquido per piatti e lavarla a mano.

Nota: accertarsi che non siano presenti sacche d'aria all'interno delle parti della maschera mentre questa è immersa.

Sciacquare accuratamente. Asciugare il dispositivo di fissaggio sul capo e i rivestimenti protettivi in tessuto su superficie piana o appesi. Assicurarsi che la maschera sia asciutta prima dell'uso.

Nota: non asciugare le parti in tessuto in asciugatrice.

Attenzione: qualunque deviazione dalle istruzioni potrebbe compromettere le prestazioni del prodotto.

Attenzione: non usare candeggina, alcol, soluzioni detergenti contenenti candeggina o alcol o soluzioni detergenti contenenti balsamo o idratante.

Istruzioni per il lavaggio in lavastoviglie

Oltre al lavaggio a mano, la maschera può essere lavata in lavastoviglie una volta la settimana.

Attenzione: utilizzare esclusivamente un detergente delicato per piatti liquido per lavare la maschera.

Rimuovere i componenti in tessuto. Non lavare i componenti in tessuto nella lavastoviglie. Lavare nel ripiano superiore della lavastoviglie.

Nota: non utilizzare il ciclo con asciugatura nella lavastoviglie.

Fare asciugare all'aria. Assicurarsi che la maschera sia asciutta prima dell'uso.