

MASCHERA ORONASALE AMARA EE CON BRETELLA DI FISSAGGIO E WHISPER



La maschera oronasale Amara è progettata per fornire un'interfaccia per l'erogazione della terapia CPAP o della terapia bi-level ai pazienti.

La maschera deve essere usata su pazienti di peso >30 kg ai quali sia stata prescritta la terapia CPAP o la terapia bi-level.

Nota importante: poiché nella maschera è incorporata una valvola espiratoria, non è necessario utilizzarne una separata.

Materiali Utilizzati:

Corpo maschera: policarbonato

Cuscinetto: silicone

Cuscinetto frontale: silicone Connessioni: policarbonato Bretella di fissaggio: UBL/lycra

Clip di fissaggio bretella: poliestere elastomero

N.B. NON E' RILEVATA PRESENZA DI LATTICE NATURALE

Pulizia:

Lavare a mano la maschera prima di usarla per la prima volta e poi giornalmente.

Il dispositivo di fissaggio sul capo va lavato a mano ogni settimana o secondo necessità. Per la pulizia giornaliera della maschera non è necessario rimuovere il dispositivo di fissaggio sul capo.

1. Lavare manualmente la maschera in acqua calda con detergente liquido per piatti.
2. Sciacquare accuratamente.

Prima dell'uso lasciare asciugare perfettamente all'aria. Prima di usare la maschera accertarsi che sia asciutta. Mettere ad asciugare il dispositivo di fissaggio sul capo su una superficie piana oppure appenderlo a una corda da bucato. Non asciugarlo in asciugatrice.

Attenzione: non usare candeggina, alcol o soluzioni detergenti contenenti candeggina o alcol, o soluzioni detergenti contenenti ammorbidenti o idratanti.

Attenzione: Qualsiasi scostamento dalle presenti istruzioni può influire sulle prestazioni del prodotto.

Attenzione: Controllare la maschera per eventuali danni o usura (fessurazione, screpolature, lacerazioni, ecc.). Gettare e sostituire eventuali componenti come necessario.

Istruzioni per il lavaggio in lavastoviglie

Oltre al lavaggio a mano, la maschera può essere lavata in lavastoviglie una volta la settimana.

Attenzione: per lavare la maschera, usare soltanto un detergente liquido delicato per stoviglie.

1. Staccare il dispositivo di fissaggio sul capo. Non lavare in lavastoviglie il dispositivo di fissaggio sul capo.
2. Separare il cuscinetto e il rivestimento anteriore e lavare nel cestello superiore della lavastoviglie.
3. Asciugare all'aria. Prima di usare la maschera accertarsi che sia asciutta.
4. Controllare tutti i componenti per escludere la presenza di danni o usura; sostituire tutti quelli che sono visibilmente deteriorati (ovvero che presentano fessurazioni, screpolatura, lacerazioni, ecc.). Sostituire la maschera se il cuscinetto si è indurito.