

DREAMWEAR GEL PILLOWS MASCHERA A OLIVE NASALI IN GEL CON BRETELLA DI FISSAGGIO E WHISPER



DESCRIZIONE

Maschera nasale per ventiloterapia Bi-Level e CPAP con bretella di fissaggio.

La maschera nasale DREAM WEAR GEL PILLOWS è progettata per fornire un'interfaccia per la somministrazione della terapia CPAP (Pressione positiva continua delle vie aeree) o bi-level ai pazienti. La maschera è destinata all'utilizzo domestico monopaziente oppure in ambiente ospedaliero/sanitario multi-paziente. La maschera deve essere utilizzata su pazienti (peso >30 kg) ai quali è stata prescritta la terapia CPAP o bi-level. è destinata a fornire un'interfaccia per la somministrazione della terapia CPAP o bi-level ai pazienti. Nota:

- Poiché in questa maschera è incorporata una valvola espiratoria, non è necessario utilizzarne una separata.

Materiali utilizzati

Struttura: silicone

Cuscinetto: silicone

Olive nasali a contatto col paziente: gel

Raccordo a gomito: policarbonato Bretella di fissaggio: tessuto Lycra

N.B. NON E' RILEVATA PRESENZA DI LATTICE DI GOMMA NATURALE O DEHP

Temperatura di stoccaggio -20°C ÷ +60°C

Umidità di stoccaggio 15% ÷ 95% senza condensa

Confezionamento Clinicamente pulito.

Imballaggio 1116696 □ FitPack - **Confezione struttura Tg. MED e 3 cuscinetti (S, M, L)**

Pulizia

Giornalmente: lavare a mano le parti non in tessuto. Settimanalmente: lavare a mano le parti in tessuto. Smontare la maschera (vedere la sezione Smontaggio).

Immergere la maschera in acqua calda con detersivo liquido per piatti e lavarla a mano.

Nota: accertarsi che non siano presenti sacche d'aria all'interno delle parti della maschera mentre questa è immersa. Sciacquare accuratamente.

Asciugare il dispositivo di fissaggio sul capo e i rivestimenti protettivi in tessuto su superficie piana o appesi. Assicurarsi che la maschera sia asciutta prima dell'uso.

Nota: non asciugare le parti in tessuto in asciugatrice.

Attenzione: qualunque deviazione dalle istruzioni potrebbe compromettere le prestazioni del prodotto.

Attenzione: non usare candeggina, alcol, soluzioni detergenti contenenti candeggina o alcol o soluzioni detergenti contenenti balsamo o idratante.

Istruzioni per il lavaggio in lavastoviglie. Oltre al lavaggio a mano, la maschera può essere lavata in lavastoviglie una volta la settimana.

Attenzione: utilizzare esclusivamente un detersivo delicato per piatti liquido per lavare la maschera.

Rimuovere i componenti in tessuto. Non lavare i componenti in tessuto nella lavastoviglie.

Lavare nel ripiano superiore della lavastoviglie.

Nota: non utilizzare il ciclo con asciugatura nella lavastoviglie.

Fare asciugare all'aria. Assicurarsi che la maschera sia asciutta prima dell'uso.

Attenzione: non usare candeggina, alcol, soluzioni detergenti contenenti candeggina o alcol o soluzioni detergenti contenenti balsamo o idratante.