


Istruzioni per la stampa

1 Stampare la guida alle misure

- Stampare su carta in formato US Letter o A4.
- Assicurarsi di selezionare "Dimensioni effettive" e non "Adatta" nelle impostazioni della stampante.
- Per risultati ottimali, stampare a colori.

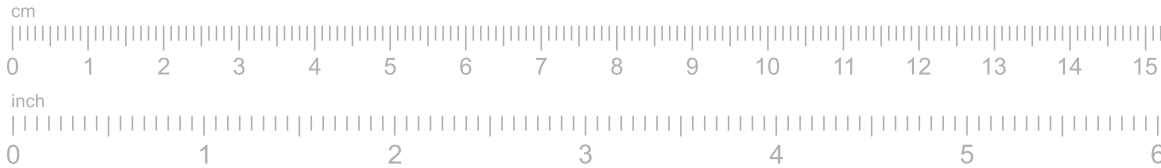

2 Misurare la stampa



- Posizionare il righello sulla scala qui sotto e assicurarsi che sia della stessa misura.

SUGGERIMENTO

Usare uno specchio o chiedere a qualcuno di aiutarti con la misurazione.

Istruzioni per la guida alle misure

- 1 Tagliare attentamente lungo le linee tratteggiate.
- 2 Posizionare la guida sul viso in modo che il naso sporga attraverso un foro di misurazione alla volta.
- 3 Scegliere la misura più adatta al naso.

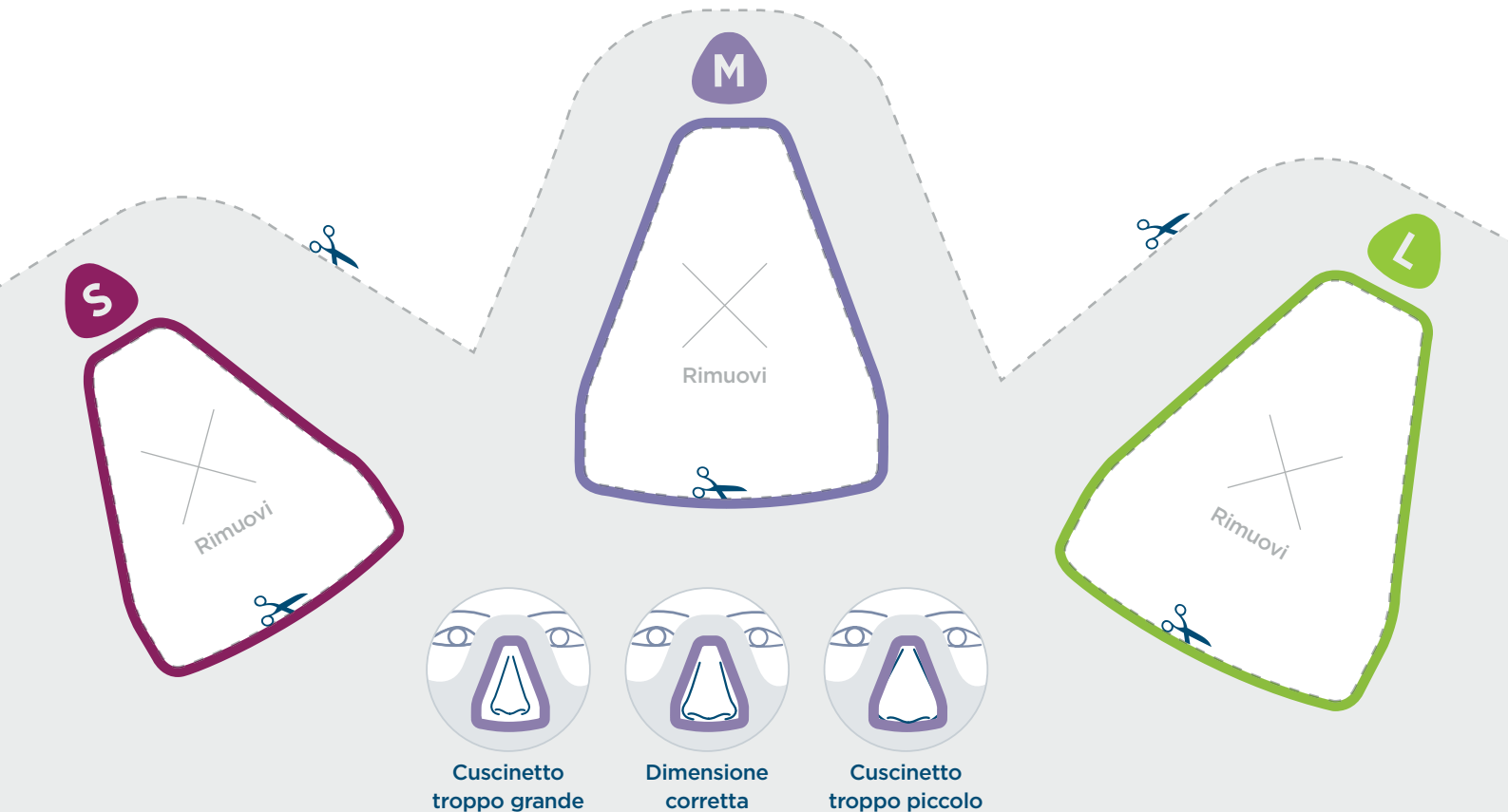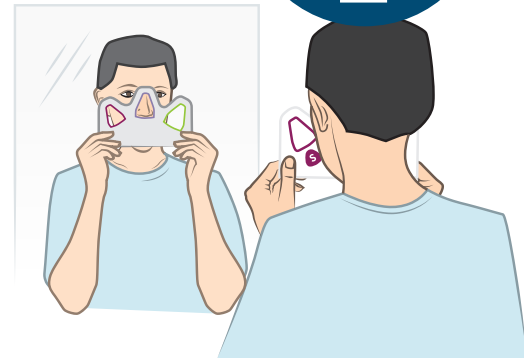

Questo potrebbe non essere un prodotto adatto a voi. Prima dell'acquisto, leggere le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
La maschera nasale F&P Nova™ potrebbe non essere disponibile su tutti i mercati.